

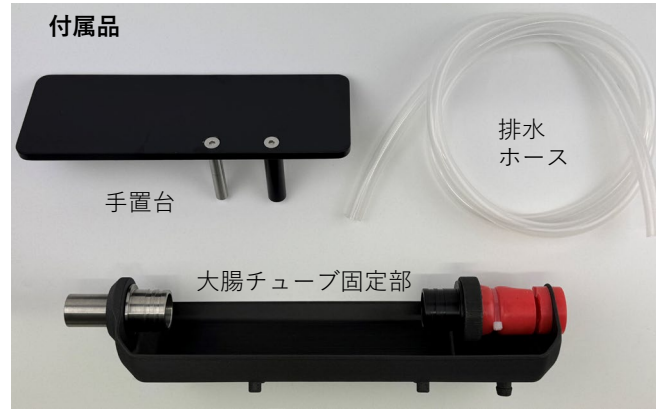


G-Master ESD大腸チューブKit 取扱説明書

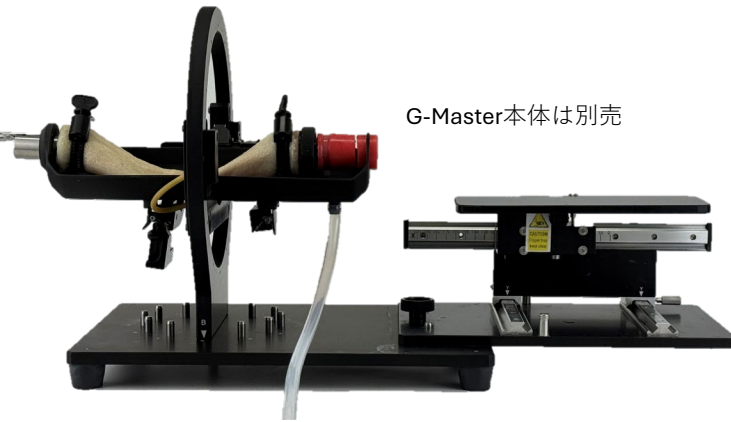

【セッティング方法】


①G-Masterの内視鏡導入部を外して手置台をセットする

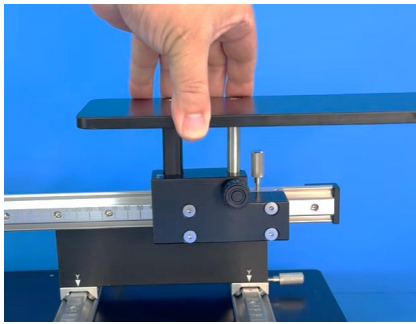

② G-Masterクリップアーム根本部【R】【L】を ▼2 の位置にセットする




③G-Masterの【A】を3に、【B】を6にセット

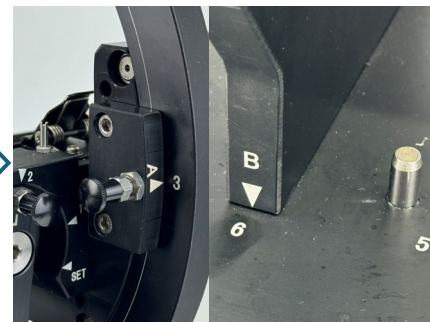

④大腸チューブ固定部下面2ヶ所のフックをクリップに挟んで固定する



⑤ESD大腸チューブ（別売）をセットして付属のバンドで固定する

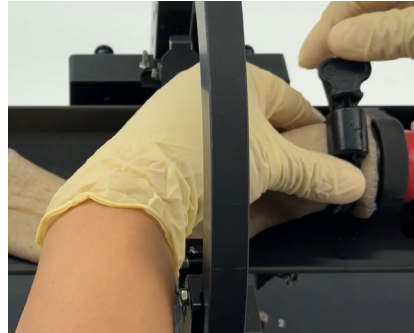

⑥下面のホース口に排水ホースをセットして、排水を受けるバケツなどに流す



⑦対極ケーブルを端部の金属筒に接続する



※注水する場合は「生理食塩水」又は同等塩分濃度の塩水をご使用ください。



セッティング方法の動画はこちら

KOTOBUKI
Medical

KOTOBUKI Medical 株式会社

TEL : 048-951-5211

URL: <https://kotobukimedical.com/>