


①胃体上部小弯（噴門直下）



<https://kotobukimedical.com/esd-training/G-master/setting/>

セッティングの手順を動画でもご覧いただけます。

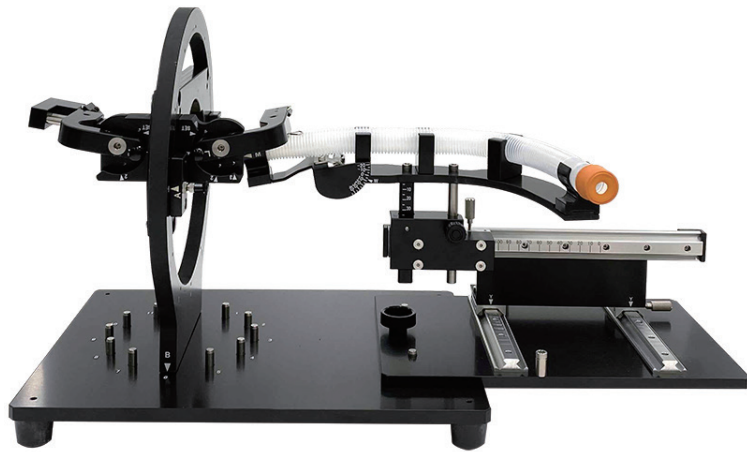

①胃体上部小弯（噴門直下）セッティング完了イメージ

- ・はじめに、【X チューブ左右】を0位置に戻してからセッティングするとスムーズです。
- ・【Z チューブ上下】調整の際、指を挟まないようご注意ください。

| 記号 | 箇所名 | 位置番号 | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------|-----|--------|-----|--------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | SET | | 1 (直線) | | 2 (曲面) | | S : 1 (送気) ⇔ 2 (脱気) | | | | | |
| R | 粘膜保持アーム右 | SET | | 1 (直線) | | 2 (曲面) | | S : 1 (送気) ⇔ 2 (脱気) | | | | | |
| L | 粘膜保持アーム左 | SET | | 1 (直線) | | 2 (曲面) | | 3 (脱気) | | | | | |
| A | 垂直回転位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B | 水平回転位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Y | チューブ前後 | | +20 | +10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | | | |
| X | チューブ左右 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| | | | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Z | チューブ上下 | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| W | チューブ角度 | -20 | -10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| M | ヘラ差込み位置 | 無し | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| | 背面ゴム紐 | 無し | 有り | | | | | | | | | | |